

LIFECLEAN DESINFEKTION

ANVÄNDARINSTRUKTIONER

Färdigblandad lösning för rengöring och desinfektion av ytor med bevisad effekt på bakterier, virus, svamp och sporer.

Effektiv mot

Vegetativa bakterier, virus, svamp, mykobakterier (t.ex. TB) inom 1 minut och endosporer, t.ex. *Clostridium difficile* och *Bacillus subtilis* inom 2 minuter.

Redo att användas

LifeClean är färdigblandad och redo att användas direkt från flaskan. Detta säkerställer att blandningen alltid har den tänkta koncentrationen och är enkel att använda.

Innehåll

ClO₂
pH

Nominell 200 ppm
Sur vattenlösning

Metod för desinfektion av ytor

i enlighet med gällande lokala föreskrifter:

Ytor	Städredskap
1 Avlägsna synlig smuts och tidigare applicerade kemikalier från tänkt appliceringsyta.	1 Rengör redskapet i förväg, avlägsna synliga föroreningar.
2 Applicera generöst med LifeClean på en ren trasa och torka avsedd yta. Verkningsstid inom 2 minuter.	2 Lägg redskapet i en behållare fylld med LifeClean lösningen.
3 Efter desinfektion, torka av ytan om det råder osäkerhet om materialkompatibilitet med desinfektionslösningen. Följ alltid dom lokala rutinerna.	3 Verkningsstid inom 2 minuter.
4 Regelbunden avsköljning av ytor med vatten rekommenderas.	4 Rengörs, sköljs och torkas av väl.
5 Följ dom lokala riktlinjerna för personligt skydd.	För information om personlig hantering, stabilitet och materialkompatibilitet, se aktuellt säkerhetsdatablad.
6 Stäng öppnad flaska och märk med öppningsdag. Öppnad flaska hållbar 4 veckor från öppningsdag.	
7 Överskottsvätska kan hällas i avloppet, tömd flaska lämnas till återvinning. Användning av LifeClean Desinfektion anses inte som hälso- eller miljöfarligt enligt gällande riktlinjer.	