


Ny bruksanvisning för Pharmapore PU

Från och med oktober månad kommer en mer detaljerad bruksanvisning att finnas med i förpackningarna för Pharmapore PU. Detta med anledning av att instruktionen varit ottydlig avseende att förbandet bör strechas och böjas bakåt för att öppna slitsen innan förbandet appliceras. Detta för att stödpappret enkelt skall kunna tas bort. Dessutom bör stödpappret avlägsnas med början i slitsens yttre hörn.

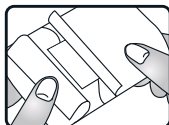


1. Dra lätt i förbandet och böj bakåt för att öppna slitsen i stödpapper nr 3.

Ta därefter bort skyddspappren.



2. Applicera försiktigt på huden.

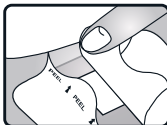

3. Ta bort stödpapper 3 med början i slitsens yttre hörn.



4. Det tunna, elastiska och vattentäta sårfilmen sitter nu fast på huden.

DeTECH Group AB