

Göteborg 2020-07-02

Viktigt information till marknaden

Vi har blivit informerade att förfyllda Luer-Lock sprutor 10 ml 0,9% NaCl Steril/Icke Steril med Artikelnummer 14363SNS och 14363S från Sterisets har haft brister i kvalitén. Det har varit enstaka incidenter med trasig/bruten tipp före eller under användning.

OneMed har i år levererat 1,4 millioner sprutor och av dessa haft totalt 17 anmälda reklamationer med ovanstående problem. Men naturligtvis tar vi varje reklamation på största allvar trots att de i förhållande till levererat antal är ganska få.

OneMed tog beslut att på eget initiativ stoppa leveranserna av 10 ml sprutor tills vi fått information från tillverkaren Sterisets. Officiellt svar förväntas komma imorgon 3/7 2020 men förhandsbeskedet är att sprutorna ej utgör någon patientfara och går att använda.

I väntan på ett officiellt svar från tillverkaren uppmanar vi användarna att vidta extra försiktighetsåtgärder genom att:

- Kontrollera om sprutan har några synliga sprickor eller defekter före användandet
- Skruva inte fast sprutan hårdare än nödvändigt
- Kontrollera att tippen på luer lock är hel efter användandet

Upptäcks defekta sprutor skall det genast reklameras till OneMed och vi kommer även ersätta dessa utan kostnad.

Vid frågor gällande denna information vänligen kontakta:

Jörgen Rasmussen

Nordic Sales Manager

Jorgen.Rasmussen@onemed.com

+46 738417663

Håkan Samuelsson

Business Area Manger

Håkan.samuelsson@onemed.com

+46 732007258