

AV nummer: 7507

SÄKERHETSMEDDELANDE - Indragning

Bäste kund!

Som återförsäljare av Teleflex Rusch Endotrakealtuber ber vi Er att vänligen läsa igenom nedanstående information samt vidtaga aktuella åtgärder. Det är viktigt att denna information vidarebefordras till samtliga användare och berörda inom Er organisation.

Teleflex Rusch Endotrakealtuber

I händelse av att pilotballongen inte blåser upp finns det en potentiell risk för skada på patienten eftersom pilotballongen inte längre reflekterar kuffens tillstånd, vilket kan leda till överuppblåsning av kuffen. Risken kvarstår in situ, därför bör läkare utvärdera risknyttan för enskilda patienter av extubation och reintubation.

I händelse av att kuffen inte töms, finns det en potentiell risk för skada om enheten tas bort från patienten med kuffen fortfarande uppblåst. Om extubering och avlägsnande av endotrakealtuben är planerad och kuffen inte kan tömmas via Bepak-ventilen på pilotballongen, bör kuffslangen klippas av för att underlätta passiv tömning av kuffen.

Lev.artikelnummer	Artikelnummer	Lot-nummer	Tidsram	Sista datum för retur/kreditering	Avvikelse-nummer
Se bilaga Indragning 7507 art.no_batch_bilaga1		Se bilaga Indragning 7507 art.no_batch_bilaga1	2021-05	2023-01-31	7507

Vänligen undersök om ni har beröra produkter med aktuellt LOT nummer. Sätt alla beröra produkter i karantän samt sammanställ vika produkter och Lot nummer som ni har i era ägo.

Skicka in vilka produkter, Lot-nummer samt antal till vår Kundservice för retur och kreditering.

Kontakta Mediq kundservice för vidare handläggning och uppge ovan avvikelenummer.

Telefon: 031-388 90 00

E-post: kundservice@mediq.com

Vi ber om ursäkt för eventuella olägenheter och tackar för Er förståelse.

Med vänlig hälsning

Marcus Nilsson

Produktchef Anestesi/ Intensivvård