



THUASNE

MOBIDERM
STIMULERAR OCH
MOBILISERAR LYMF-
SYSTEMET



MOBIDERM

Mobiliserar lymfödemet under natten

Mobiderm är ett strukturerat material bestående av kuber inneslutna i ett lätt elastiskt material. Det som gör Mobiderm till ett unikt och patenterat material är att alla kuber är placerade på olika sätt. Vissa pekar uppåt, andra nedåt eller är vridna åt olika håll. På så vis applicerar varje enskild kub olika tryck på vävnaden och påvekar lymfödemet på olika sätt.


Den **oregelbundna** placeringen av kuberna skapar en effektiv mikromassage där lymfvätska under kuber med högre tryck pressas undan till områden med lägre tryck. Mobiliseringen aktiverar lymfsystemets kollektorer vilket sätter fart på hela lymfsystemet.

Lymfödemet kontrolleras samtidigt som fibrotisk vävnad bearbetas och luckras upp. Flera studier* visar att brukare som använder Mobiderm under natten motverkar återsvullnad, något som annars är ett vanligt förekommande problem.

De bästa av allt? Allt sker under natten, när brukaren sover.

Mobiderm är nämligen avsett att användas vid vila eller under natten. Brukaren vaknar utvilad efter lång natts sömn och får lättare att ta på sig sina medicinska kompressionsstrumpor för användning under dagen.

Mobiderm är tillgängligt i två strukturer, stora kuber som lämpar sig bäst för större vävnader, och små kuber för mindre vävnader som exempelvis hand- och fotryggar.

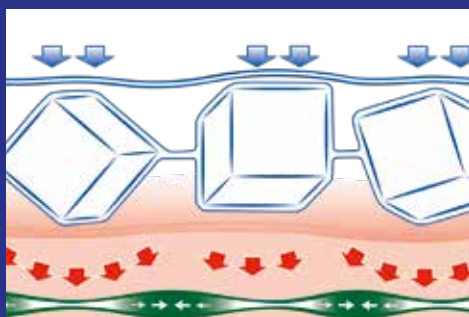

Strukturens genomtänkt oregelbundna design sätter fart på lymfsystemet.



Stora kuber 15x15 mm



Små kuber 5x5 mm



I denna broschyr refererar vi till filmer som finns på vår kanal på YouTube. Du hittar vår kanal genom att söka efter "Thuasne Scandinavia".

(1) Mestre -Intérêt du manchon de compression nocturne auto-ajustable Mobiderm Autofit dans la phase de maintien du traitement du lymphoedème du membre supérieur: l'étude pilote Marilyn-Support Care Cancer (25:2455-2462) -2017 - Pages 6 & 7



Innehållsförteckning

Mobidermteknologin	2
Bandageringskit	4
Ark och bandage	5
Mobiderm standard	6
Mobiderm Autofit	8
Mobiderm Intimate Shorts	10
Mobiderm Intimate Bra	12
Mobiderm måttillverkning	14
Medicinska studier	16
Silima Care Concept	18

MOBIDERM

I reduktionsfasen

Visste du att vi tillverkade bandage redan på 1800-talet? Elastiska och kompressiva bandage är därför en av våra specialiteter.

Vi är extra stolta över kvaliteten på våra bandage och lindor. Med över 180 års erfarenhet har vi en enorm kunskap och kompetens inom området. Våra Biflex-bandage tillverkas än idag i samma fabrik i St Etienne, Frankrike, även om stickningsmaskinerna har uppdaterats sedan företaget grundades 1847. När andra tillverkare köper in färdigspunnen tråd tillverkar vi större delen av vår förbrukning själva. Vi har därför full kontroll över hela tillverkningsprocessen och kan garantera att materialen inte innehåller några otillåtna ämnen eller substanser.

Studier visar att du kan uppnå maximal ödem-reducering snabbare genom att inkludera ett bandage med Mobidermstruktur i en multilagersbandagering jämfört med ett normalt polstringsmaterial. Det innebär att du kan spara både tid och pengar men ändå uppnå samma fina resultat.

Sedan 2021 erbjuder vi kompletta kit med allt du behöver för att behandla en arm eller ett ben.



Genom att inkludera Mobidermstruktur i en multilagersbandagering kan du spara mycket tid och pengar.

Dessa kit innehåller bland annat bomulls-linda, Mobidermbandage och elastiska kompressionsbandage.

Använder du förresten kompressionspump som del i din behandling? Studier från ett behandlingscenter i Warszawa, Polen, visar att patienter som kombinerar behandlingen med Mobiderm fick bättre resultat med lägre tryck under kortare tid jämfört med patienter som inte använde Mobiderm.

Mer information om studier på sida 16.

Kompletta kit för multilagersbandagering av arm och ben



Art nr 3700902999902

Bandageringskit för ben

- 1 st Biflex 16+ bandage, 10 cm x 3 m
- 1 st Biflex 16+ bandage, 10 cm x 5 m
- 1 st Biplast bandage, 3 cm x 2.5 m
- 2 st kortsträcks bomullsbandage, 11 cm x 4 m
- 3 st Mobiderm bandage, 10 cm x 3 m
- 2 st Biflexideal bandage, 10 cm x 5 m



Art nr 3700902999901

Bandageringskit för arm

- 1 st Biflex 16+ bandage, 8 cm x 5 m
- 1 st Biplast bandage, 3 cm x 2.5 m
- 1 st kortsträcks bomullsbandage, 11 cm x 4 m
- 2 st Mobiderm bandage, 10 cm x 3 m
- 1 st Biflexideal bandage, 10 cm x 5 m



På YouTube finns en film som visar exempel på multilagersbandagering med Mobiderm.

MOBIDERM MATERIAL

Ark och bandage med Mobidermstruktur

Med våra ark och bandage kan du punktmarkera särskilda områden som du vill behandla lite extra.

Du kan exempelvis klippa ut en pelott från ett ark och placera denna vid hand- eller fotryggen i kombination med kompressivt material. Våra bandage med Mobidermstruktur används med fördel i kombination med elastiska bandage under reduceringsfasen för att minimera ett ödem.

Vi har även kompletta bandageringskit för både arm och ben som innehåller allt du behöver för att göra en effektiv multilagersbandagering.



Art nr 37200101030001

Bandage med små kuber 300x10 cm

Art nr 37200101030002

Bandage med stora kuber 300x10 cm



Art nr 37100102502501

Ark med små kuber 25x25 cm

Art nr 37100103310001

Ark med små kuber 100x25 cm

Art nr 37100103310002

Ark med stora kuber 100x20 cm

Materialsammansättning:

Non woven. Kuber: polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5).
Se etikett för detaljerad information.

MOBIDERM STANDARD

Standardstorlekar för arm och hand

Våra standardprodukter för arm och hand är lika prisvärda som effektiva. De många storlekarna passar de allra flesta och vi garanterar mycket snabba leveranser.

Våra standardprodukter passar brukare med stabila och lätta till medelsvåra lymfödem. Eftersom armstrumpan är tillgänglig i hela 20 storlekar, varav 10 extra vida varianter, kan de allra flesta hitta en storlek som passar.


Den integrerade Mobidermstrukturen bearbetar effektivt lymfödemet under natten. Den genomtänkt ostrukturerade placeringen av kuberna skapar oregelbundna tryckskillnader vilket stimulerar och mobiliserar lymfsystemet.

Den avtagande kompressionen är ca 15 mmHg vid handleden vilket är fullt tillräckligt då det är funktionen från Mobidermstrukturen, inte kompressionen, som spelar roll. Denna lätta kompression är fullt tillräcklig och ger som bonus även en proprioceptiv effekt som kan upplevas smärtlindrande hos brukaren.

I sortimentet finns även en handske för höger eller vänster hand samt en handdel som passar både höger och vänster hand.

- **Handdelen utan fingrar** kan vändas ut och in och passar därför både höger och vänster hand.
- Armstrumpan finns i hela **20 olika standardstorlekar**, bland annat med extra vid passform.
- **Mycket prisvärda produkter** med **snabba leveranser** eftersom de alltid finns på lager.
- **Armstrumpan** har genomgående stora kuber medan **handsken** och **handdelen** har små kuber placerade vid handryggen.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.

Utföranden

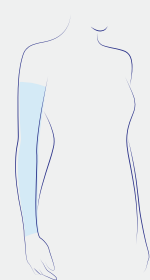

Art nr 373002
Armstrumpa



Art nr 373201
Handske



Art nr 373101
Handdel

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5). Se etikett för detaljerad information.

- Tvättas i maskin 30 grader.
- 6 mån garanti.



På YouTube finns flera filmer om Mobiderm

Mobiderm Armstrumpa

	Omfångsmått		
	cC	cD	cG
1	14 - 16	22 - 25	25 - 29
2	16 - 18	25 - 28	29 - 33
3	18 - 20	28 - 31	32 - 36
4	20 - 22	31 - 34	35 - 39
5	22 - 24	34 - 37	38 - 42
ℓG Normal längd			40 - 45
ℓG Lång längd			45 - 50

Alla storlekar passar både höger och vänster arm.

Mobiderm Armstrumpa x-vid

	Omfångsmått		
	cC	cD	cG
1+	14 - 16	24 - 27	28 - 32
2+	16 - 18	27 - 30	31 - 35
3+	18 - 20	30 - 33	35 - 39
4+	20 - 22	33 - 36	38 - 42
5+	22 - 24	36 - 39	41 - 45
ℓG Normal längd			40 - 45
ℓG Lång längd			45 - 50

Alla storlekar passar både höger och vänster arm.

Mobiderm Handske

	Omfångsmått	
	cA	cC
1	14 - 16	22 - 25
2	14 - 16	24 - 27
3	16 - 18	25 - 28
4	16 - 18	27 - 30
5	18 - 20	28 - 31
6	18 - 20	30 - 33

Alla storlekar i vänster och höger utförande

Mobiderm Handdel

	Omfångsmått	
	cA	cC
1	14 - 16	22 - 25
2	14 - 16	24 - 27
3	16 - 18	25 - 28
4	16 - 18	27 - 30
5	18 - 20	28 - 31
6	18 - 20	30 - 33

Alla storlekar passar både höger och vänster hand.



Mobiderm Handdel



Mobiderm Handske

MOBIDERM AUTOFIT

Justerbara standardstorlekar



Mobiderm Autofit är ett sortiment med justerbara produkter för arm och ben med integrerad Mobidermstruktur.

Med Mobiderm Autofit kan brukaren själv justera och anpassa passformen efter behov. Materialets ödemreducerande funktion är därmed alltid optimal, även när lymfödemet förändras i omfång. Markeringar på materialet visar hur mycket varje enskild kardborreflik bör dras åt för att uppnå optimal funktion.

Kubstrukturen i materialet är genomtänkt ostrukturerad och skapar oregelbundna tryckskillnader i ödemet. Stimuleringen aktiverar och mobiliserar lymfsystemet vilket även motverkar och mjukar upp fibrotisk vävnad. Studier visar att brukare som använder Mobiderm Autofit på natten i mycket högre grad motverkar återsvullnad jämfört med patienter som enbart använder medicinska kompressionsstrumpor på dagen.

Mobiderm Autofit är genomtänkt utformad med stora kuber i ben- och armdelen och små kuber i fot- och handdelen. På knä- och lårstrumpans underfot finns antihalknoppor om brukaren behöver gå upp under natten.

- **Enkel på- och avtagning** eftersom materialet tas på och försluts med kardborreband.
- **Tillåtande passform** eftersom de olika banden kan fästas olika hårt.
- **Precis och kontrollerad** fastsättning tack vare fästmarkeringarna i materialet.
- **Snabb leverans** då produkterna är i standardstorlek och alltid finns på lager.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.

Utföranden



Art nr 373304
Armstrumpa med handdel



Art nr 373403
Knästrumpa



Art nr 373503
Lårstrumpa

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester. Kuber: polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5). Se etikett för detaljerad information.

- Tvättas i maskin 30 grader.
- 6 mån garanti.



På YouTube finns flera filmer om Mobiderm Autofit

Mobiderm Autofit Armstrumpa

	Omfångsmått (cm)			
	cA	cC	cD	cG
1	17 - 21	15 - 19	22 - 28	25 - 32
2	17 - 21	16 - 20	24 - 30	29 - 36
3	18 - 22	17 - 21	26 - 32	33 - 40
4	18 - 22	17 - 21	28 - 34	37 - 44
5	19 - 23	18 - 22	30 - 36	41 - 48
6	20 - 24	19 - 23	31 - 37	45 - 52
ℓG Normal längd				40 - 45
ℓG Lång längd				45 - 50

Mobiderm Autofit Knästrumpa

	Omfångsmått (cm)		
	cA	cC	cD
1	16 - 24	24 - 35	25 - 36
2	20 - 28	32 - 43	32 - 43
3	24 - 32	40 - 51	39 - 50
4	28 - 36	48 - 59	46 - 57
ℓG Kort längd			38 - 40
ℓG Normal längd			40 - 42
ℓG Lång längd			42 - 44
ℓG Extra lång längd			44 - 46

Mobiderm Autofit Lårstrumpa

	Omfångsmått (cm)		
	cA	cC	cG
1	16 - 24	24 - 35	46 - 57
2	20 - 28	32 - 43	53 - 65
3	24 - 32	40 - 51	61 - 72
4	28 - 36	48 - 59	68 - 80
ℓG Kort längd			67 - 72
ℓG Normal längd			72 - 77
ℓG Lång längd			77 - 82
ℓG Extra lång längd			82 - 87



Mobiderm Autofit lårstrumpa



Mobiderm Autofit knästrumpa



MOBIDERM INTIMATE SHORTS

Mobiliserar ödem i genitaleområdet



Med Mobiderm Intimate Shorts erbjuder vi äntligen en specifikt utvecklad produkt för patienter med genitala lymfödem.

Mobiderm Intimate Shorts har utvecklats tillsammans med vårdpersonal och brukare för att möta alla tänkbara krav och önskemål. Resultatet är en produkt med en löstagbar pelott med Mobidermstruktur i en diskret design.

Kompressionen i materialet är väl genomtänkt med ett graderat tryck motsvarande 15-20 mmHg runt bäckenområdet där även pelotten är placerad. Vid benens avslut är kompressionen endast ca 5 mmHg vilket gör att shortsens fördel även kan kombineras med överlappande medicinska kompressionsstrumpor. Eftersom det är funktionen från Mobidermstrukturen som aktiverar lymftransporten är kompressionsgraden fullt tillräcklig.

Mobiderm Intimate Shorts har pelotter med Mobidermstruktur som kan tas ur och tvättas separat. Dessa pads är annorlunda utformade för kvinnor och män eftersom deras behov ser annorlunda ut.

Tillsammans med tre behandlingscentrum i Frankrike har vi även genomfört en medicinsk studie med Mobiderm Intimate Shorts. Studien visar att ca 80% av användarna fick bättre resultat. Studien publiceras under 2023 men resultaten har redan presenterats vid *46th European Society of Lymphology-kongressen, 2022*. Assisi, Italien, se sid 16.

- **Färdig lösning** för kvinnor och män med ödem i genitalområdet.
- **Mycket prisvärda produkter** med **snabba leveranser** eftersom de alltid finns på lager.
- **Kan kombineras med lårstrumpor** för behandling av hela benen.
- **Särskilt utformade pelotter** med Mobidermstruktur med olika design för kvinnor och män.
- **Används dag och natt** beroende på behov.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.
- **Separata pelotter** kommer att kunna beställas under andra halvan av 2023.

Art nr 373601

Mobiderm Intimate Shorts för kvinnor

Art nr 373701

Mobiderm Intimate Shorts för män

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum. Se etikett för detaljerad information.

- **Tvättas i maskin 40 grader.**
- **6 mån garanti.**



På YouTube finns instruktioner för påtagning av Mobiderm Intimate Shorts

Mobiderm Intimate Shorts

	Omfångsmått	
	cG	cH
1	45 - 54	88 - 94
2	48 - 58	95 - 101
3	51 - 62	102 - 108
4	54 - 66	109 - 115
5	57 - 69	116 - 122
6	60 - 72	123 - 129

cG = låromfång
cH = omfång över stussen


Alla storlekar finns i dam- och herrmodell.



Mobiderm Intimate Shorts för kvinnor



Pelott för kvinnor

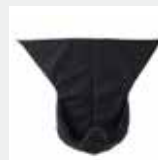

Skålformad pelott för män



Mobiderm Intimate Shorts för män



MOBIDERM INTIMATE BRA

Kompressions-BH som mobiliserar och reducerar postoperativa och kroniska ödem i bröstområdet

Mobiderm Intimate BH är en optimal behandlingslösning för kvinnor som har bröstrelaterade ödem.

2-3 av 10 kvinnor riskerar att utveckla lymfödem till följd av strålning eller kirurgiska ingrepp i samband med bröstcancer. Oavsett om det rör sig om ablation eller bröstkonserveringsterapi (BET) kan ödem uppstå akut post-operativt eller manifesteras sig långt senare som kroniskt lymfödem i bröst och/eller bröstorg.

Studier uppskattar att fler än 1,5 miljoner patienter över hela världen har drabbats av bröstcancerrelaterade ödem.

Mobiderm Intimate Bra är en kompressions-BH som är särskilt utvecklad för postoperativt bruk, dels i den akuta fasen efter behandling av bröstcancer samt vid långvarig behandling av kroniska lymfödem.

Mobiderm Intimate Bra har en effektivt kompressiv funktion som tillsammans med den integrerade pelotten med Mobidermstruktur dränerar och bearbetar ödemet samt minimerar risken för hematom.

Mobiderm Intimate Bra är genomtänkt utformad med breda och mjuka axelband, högt skuren under armarna och väl integrerade sömmar som inte skaver. De två medföljande pelotterna med Mobidermstruktur kan tas ur och tvättas separat.

- **Unik produkt** för kvinnor med bröst- och bröstorgsrelaterad ödemproblematik.
- **Integrerade fickor** för externa bröstproteser
- **Urtagbara pelotter** med **Mobidermstruktur**.
- **Perfekt avvägd kompression** i kombination med Mobidermstrukturen mobiliserar och reducerar ödemet.
- **Justerbara axelband** med hakar och hyskor i tre rader på samtliga storlekar.
- **Breda vadderade axelband** säkerställer att cirkulationsförmågan inte påverkas.
- **Platta och mjuka sömmar** som inte skaver ger ökad komfort vid långvarigt bruk.
- **Dragkedja fram** gör Mobiderm Intimate BH lätt att ta på och av.

Art nr T571301
Mobiderm Intimate Bra

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum. Se etikett för detaljerad information.

- *Tvättas i maskin 30 grader.*
- *6 mån garanti.*

Mobiderm Intimate Bra

	Kup-storlek		
X-Small (stl 70-75)	AA/A	B/C	D/E
Small (stl 80-85)	AA/A	B/C	D/E
Medium (stl 90-95)	AA/A	B/C	D/E
Large (stl 100-105)	AA/A	B/C	D/E
X-Large (stl 110-115)	AA/A	B/C	D/E

Välj storlek enligt omfånget under bysten (cm)

68-77	78-87	88-97	98-107	108-117
▼	▼	▼	▼	▼
XS	S	M	L	XL
▼	▼	▼	▼	▼

Välj kupa genom att mäta omfånget runt bysten (cm)

AA / A	◀ 80-89	90-99	100-109	112-119	120-129
B / C	◀ 84-93	94-103	104-113	116-123	124-133
D / E	◀ 88-97	98-107	108-117	120-127	128-137



Två pelletter med Mobiderm-
struktur medföljer.



Mobiderm Intimate Bra
framifrån



Mobiderm Intimate Bra
bakifrån

MOBIDERM MTM

Individuellt måttillverkade produkter

Individuellt måttillverkade produkter är perfekta vid svårare former av lymfödem som kräver exakt passform för bästa möjliga behandlingsresultat.


Även om våra standardprodukter passar de allra flesta så krävs det ibland en skraddarsydd lösning. Med vårt sortiment av måttillverkade utföranden kan vi erbjuda en individuell lösning till både barn och vuxna med omfångsmått som inte riktigt passar in på en standardstorlek.

Måttillverkade utföranden är även att föredra vid svårare stadier av lymfödem med områden av fibrotisk vävnad, samt då armen eller benets anatomiska form helt enkelt inte lämpar sig för en standardstorlek.

För enklare på- och avtagning finns även möjlighet att integrera en öppning med kardborrestängning. Har du andra önskemål? Kontakta oss!

- **Leverans inom 10 arbetsdagar** trots att varje produkt består av många olika komponenter som alla anpassas och kombineras enligt brukarens mått.
- Vi använder **samma mätpunkter** som du redan är van vid från förskrivning av andra medicinska kompressionsstrumpor.
- **Välj mellan Mobiderm-struktur** med små eller stora kuber i hela benet eller små i fotdelen och stora i bendelen.
- **Instruktionsfilmer för måttagning** finns på vår YouTube-kanal.
- **I vår e-shop** kan du göra reorder, reorder med ändringar eller beställa produkter med nya mått, givetvis med full historik.
- **Den patenterade strukturen** stimulerar och aktiverar lymfsystemet.

Utföranden

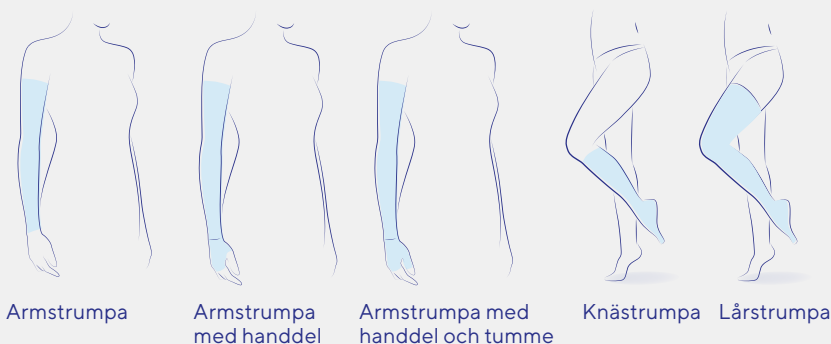

- **Tvättas i maskin 30 grader.**
- **6 mån garanti.**

För knä- och lårstrumpan kan du välja:

- Stora kuber i benet och små i fotdelen
- Endast stora kuber i både ben- och fotdel
- Endast små kuber i både ben- och fotdel

Materialsammansättning:

Polyamid, elastan, polyester, polyuretanskum (15x15 mm), polytylenskum (5x5). Se etikett för detaljerad information.



På YouTube finns filmer som visar korrekt måttagning av både arm- och benstrumpor.





MOBIDERM


Bevisat medicinskt effektiv i flera studier

Mobiderm har deltagit i flera medicinska studier. Resultaten är mycket positiva och det råder ingen tvekan om att Mobiderm är ett effektivt verktyg för att behandla lymfödem.

- Mobiderm **motverkar återsvullnad** efter reduktionsfasen.
- Mobiderm Autofit **stabiliserar och kontrollerar** lymfödemet under underhållsfasen.
- Hos patienter som nyligen diagnosticerats med lymfödem visar studien **tydlig volymreduering**.
- Användning av Mobiderm under natten kan **reducera ödemets volym**, ha en **smärtlindrande verkan** och ger en proprioceptiv effekt som har en **lugnande inverkan**.
- Om Mobiderm används tillsammans med kompressionspump uppnås bättre resultat trots **lägre tryck under kortare tid**.

Mestre	Exploratory study to evaluate the clinical benefits of wearing the Mobiderm Intimate Shorts in patients with pelvic and/or genital lymphedema 46th European Society of Lymphology Congress – June 16-17-18 2022. Assisi, Italy.	2022
Dahr	Mobility - safety and efficacy of Mobiderm-bandage in the management of Lymphedema	2022
Todd	Mobiderm Autofit : an adjustable sleeve that enables patients to self-manage LO	2018
Toccafondi	Clinical use of a night-time Mobiderm garment as a treatment modality for breast cancer related LO	2017
Tchórzewska	The use of ipc with mobiderm in upper limb lymphoedema treatment	2017
Mestre	Mobiderm Autofit night-time compression sleeve in maintenance phase of upper limb LO: the MARILYN pilot RCT	2017
Whitaker	Lymphoedema management at night: views from patients across 5 countries	2016
Quééré	Prospective multicenter observational study of LO therapy: POLIT study	2014



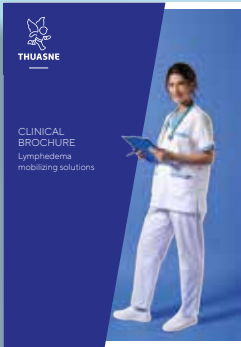

Vi har samlat 13 studier om Mobiderm och ödemdrivande produkter för användning under natten i en broschyr. Kontakta oss för mer information!



SILIMA® CARE CONCEPT

Vi tänker på dig
genom hela vård-
kedjan.

1

EFFEKTIV MINIMERING AV ÄRRVÄVNAD

CICATREX® är ett precisionstillverkat måttsytt kompressionsmaterial.

CICATREX® är en särskild typ av kompressionsmaterial för post-operativ användning i syfte att minimera ärrvävnad, exempelvis efter kirurgiskt ingrepp. Materialets egenskaper och kompression hämmar hudens naturliga mottryck vilket effektivt minimerar hypertrofisk ärrvävnad.

CICATREX® finns i flera kvaliteter, både i vävda och flatstickade varianter, och kan måttillverkas exakt efter dina önskemål och krav. Vi erbjuder även ett mindre sortiment av standardstorlekar.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



2

ÅTERSskapar EN NATURLIG KONTUR

SILIMA® är ett komplett sortiment av externa bröstproteser av mycket hög kvalitet

SILIMA® bröstproteser har en skön och naturlig känsla som ger kvinnor som genomgått bröstkirurgi en bättre livskvalitet. Vi erbjuder ett brett urval av storlekar och modeller så att alla kvinnor kan hitta en perfekt individuell lösning som både känns naturlig och ser naturlig ut.

SILIMA® tillverkas sedan 50 år vid vårt produktionscenter i Tyskland. Vi har full kontroll över hela produktionskedjan och kan säkerställa att enbart skonsamma material användas.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



3

HÅLLER ÖDEM UNDER KONTROLL

MOBIDERM® håller lymfödemet under kontroll och bidrar till en effektiv ödemreduktion.

Hemligheten bakom MOBIDERM® är den kubformade strukturen som masserar, stimulerar och aktiverar lymfsystemet från flera håll. Lymfvätska som ansamlats i vävnaden aktiveras och mobiliseras vilket leder till en snabbare reduktion av svullnaden.

MOBIDERM® har deltagit i flera studier och har bevisad effekt, dels i den initiala reduktionsfasen i kombination med bandagering och dels i underhållsfasen som komplement till flatstickade medicinska kompressionsstrumpor för användning på dagen.

Vill du veta mer? Kontakta gärna en av våra produktspecialister.



Vill du veta mer?

Kontakta oss så skickar vi en katalog med mer information om Cicatrex och Silima. Våra kontaktuppgifter hittar du på sista sidan.

WINGS FOR YOUR HEALTH

THUASNE SCANDINAVIA AB

Box 95
131 07 Nacka
Tel 08 - 618 74 50
Email : info@thuasne.se
www.thuasne.se

THUASNE REHABUTIKEN AB

Ringvägen 88
118 60 Stockholm
Tel 08 - 644 60 17
Email : butik@thuasne.se
rehabbutiken.thuasne.se



THUASNE

120 rue Marius AUFAN
92300 Levallois-Perret Cedex - France

All the medical devices mentioned on this document are CE marked according to the European council directive 93/42/EEC and its relatives or the Regulation 2017/745 on medical devices, unless specifically identified as "NOT CE MARKED". Products mentioned in this document are CE class I devices. Please contact Thuasne should you need any additional information on devices classification. Please read carefully the instructions for use, indications and contraindications of the product. We reserve the right to modify our products as shown and described in this catalogue, without previous notice. Non-contractual photographs.

Last revision date: (2023-03). Photo credits: Thierry Malty, Studio Caterin, ©Studio Caterin, ©Shutterstock/Krakenimages/pixelheadphoto digitalskillet/m imagephotography/Roman Samborsyi/ Kate Kom

www.thuasne.se

